



Co to jest badanie PCAD?

Badanie genetyczne PCAD pozwala ocenić, czy dziedziczne warianty w Twoich genach zwiększają ryzyko wystąpienia przedwczesnej choroby wieńcowej — choroby serca, która może pojawić się wcześniej niż wynikałoby to z innych czynników ryzyka.

Analizujemy geny LDLR, PCSK9 i APOB (odpowiedzialne za metabolizm cholesterolu) oraz warianty APOE i SLCO1B1 (wpływające na skuteczność statyn). Wynik pojawia się w 21 dni roboczych.



Wynik badania

21 dni roboczych

Materiał: wymaz z jamy ustnej

Zanim zaczniesz — przygotowanie

⚠ 30 minut przed pobraniem wymazu UNIKAJ:

- Jedzenia i picia czegokolwiek (poza wodą do płukania)
- Palenia papierosów i wszelkich wyrobów tytoniowych
- Picia alkoholu
- Żucia gumy i używania płukanek do ust

💧 Wypłucz usta — krok po kroku:

1. Przygotuj szklankę (ok. 50 ml) letniej wody.
2. Weź wodę do ust i płucz intensywnie przez ~10 sekund.
3. Wypłuj wodę.
4. Powtórz całą czynność 2–3 razy.

✓ Możesz teraz przystąpić do pobrania wymazu.

🔑 Co znajdziesz w zestawie:

- ✓ Wymazówka Genotek OCR-100
- ✓ Probówka z buforem zabezpieczającym
- ✓ Formularz badania (wypełnij przed pobraniem)
- ✓ Formularz świadomej zgody (podpisz przed pobraniem)
- ✓ Kod kreskowy próbki

Procedura pobrania wymazu — krok po kroku

1

Otwórz opakowanie wymazówki

Ostrożnie rozerwij opakowanie wymazówki i wyjmij ją, trzymając wyłącznie za uchwyt.

⚠ Nie dotykaj końcówki (główki wacika) — nawet przez chwilę. Dotknięcie palcem unieważnia próbkę.

1

Otwórz opakowanie



2

Wymaz — lewa strona jamy ustnej

Włóż wymazówkę do lewej strony ust.

Dociśnij główkę wacika do wewnętrznej strony policzka lub dziąseł (górze i dół).

Przesuwaj wymazówkę ruchem góra–dół, obracając ją, przez 1 minutę bez przerwy.

→ Ucisk jak podczas mycia zębów — stanowczy, ale bez bólu.

2

Wymaz – lewa strona



3

Wymaz — prawa strona jamy ustnej


Bez odkładania wymazówki — przejdź na prawą stronę ust.

Dociśnij główkę wacika do wewnętrznej strony policzka lub dziąseł (góra i dół).

Przesuwaj wymazówkę ruchem góra–dół, obracając ją, przez 1 minutę bez przerwy.

3

Wymaz – prawa strona

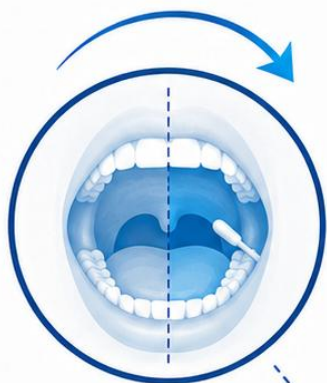

4

Umieść wymazówkę w probówce

Włóż wymazówkę do probówki z buforem — zadбай, aby główka wacika była całkowicie zanurzona.

Zakręć szczelnie probówkę.

Odwróć probówkę do góry dnem 3–5 razy, aby wymieszać bufor z materiałem.

4

Umieść wymazówkę w probówce



5

Nakleić kod kreskowy na probówkę

Nakleić unikalny kod kreskowy na boczną ścianę probówki.

Ten sam kod musi widnieć na Formularzu badania i Formularzu świadomej zgody.

Sprawdź, czy numery się zgadzają — rozbieżność uniemożliwia analizę próbki.

5

Naklej kod kreskowy



6

Przechowaj próbkę do czasu wysyłki

Ustaw próbkę pionowo w lodówce w temperaturze 2–8 °C.

Nie zamrażaj próbki.

Próbkę należy wysłać jak najszybciej — maksymalnie w ciągu 24 godzin od pobrania.

6

Przechowaj próbkę do czasu wysyłki



2–8 °C



Nie zamrażać



7

Wyślij próbkę do laboratorium

Zapakuj szczelnie próbkę wraz z formularzami (badania i świadomej zgody).

Wyślij kurierem lub dostarcz osobiście pod adres laboratorium:

Novazym Polska Sp. z o.o., ul. Człuchowska 26, 60-434 Poznań

Godziny przyjęć: poniedziałek–piątek, 8:00–16:00

7

Wyślij próbkę do laboratorium



Lista kontrolna przed wysyłką

Dokumenty:

- ☐ Formularz badania — wypełniony i podpisany
- ☐ Formularz świadomej zgody — wypełniony i podpisany
- ☐ Kod kreskowy zgodny z kodem na dokumentach

Próbka:

- ☐ Probówka szczelnie zamknięta
- ☐ Kod kreskowy naklejony na probówce
- ☐ Próbka w lodówce (2–8 °C) — maks. 24h
- ☐ Nie zamrożona

Kiedy próbka może zostać odrzucona?

1. Uszkodzona probówka lub wyciek buforu
2. Przekroczony czas dostawy (powyżej 24 godzin)
3. Brak kodu kreskowego lub niezgodność kodu
4. Nieczytelne wypełnienie formularzy

5. Brak formularza badania lub świadomej zgody

 **Technologia NGS**
Sekwencjonowanie nowej generacji

 **Geny LDLR, PCSK9, APOB**
+ warianty APOE, SLCO1B1

 **Wynik: 21 dni rob.**
Raport kliniczny w PDF



Onkoprofil | Novazym Polska Sp. z o.o.

ul. Człuchowska 26, 60-434 Poznań · tel. 607 312 486 · laboratorium@novazym.pl · www.novazym.pl

Dokument_Nr_20072026_v1